



6018 - LIQUISEPT ASPIRATION AS

Désinfectant concentré pour traitement des systèmes d'aspiration

Désinfection et nettoyage quotidien de tous types de systèmes d'aspiration, crachoirs et séparateurs d'amalgame.

Dispositif médical de classe IIb.



COMPOSITION

Le chlorure de didécyl diméthylammonium (6%), le chlorure d'alkyl diméthyle benzylammonium (5%), l'isopropanol (5%), les détergents, les agents chélatants, l'antimousse, les épaississants, les émulsionnants, le complexe enzymatique (protéase, amylase, lipase), des inhibiteurs de corrosion, les agents stabilisants et le parfum de citron. Sans aldéhyde ni phénol

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide.

Testé selon: EN 14561, EN 13727, EN 14562, EN 13624, EN 14476 +A1

MODE D'EMPLOI

PRODUIT À DILUER : soit 20 mL (une pompe) pour 1L de Solution concentrée pour usage professionnel. Utilisation en dilution de 2,00 %, soit 20 ml (1 pression de pompe) pour 1 litre d'eau froide ou chaude (max. +60°C). Temps de contact : 15 minutes. il est possible de laisser la solution agir pendant la nuit. Rincer soigneusement.

CONDITIONNEMENTS- RÉF.

28 flacons de 250 mL doseur	06018-0250
24 flacons de 500 mL doseur	06018-0500
12 flacons de 1 L doseur	06018-1000
4 bidons de 5 L + pompe 20 ml	06018-5000

- Triple action - nettoie, désinfecte et désodorise.
- Concentration d'emploi 2,00%.
- Peut être préparé avec de l'eau chaude ou froide.
- Efficacité antimicrobienne optimisée en 15 minutes.
- Non-corrosive : pH neutre : matériaux de compatibilité large Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques.
- pH neutre : matériaux de compatibilité large.
- Sans chlore et aldéhyde.
- Non-moussant.
- Sans substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques).



medical proximity™

Tel/Fax : +213 (0) 35 33 80 60

Mobile : +213 (0) 560 00 22 70

Email : medproximity.dz@gmail.com

www.medicalproximity.com