



6071 - SANITAROSA™ GA

Désinfectant pour instruments médicaux ; Glutaraldéhyde 2% ; Prêt-à-l'emploi

COMPOSITION

Glutaraldéhyde 2%, agents stabilisants, détergents non ioniques, tampons, inhibiteurs de corrosion, eau distillée.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, fongicide, tuberculocide, virucide and sporicide. Actif contre les bactéries, les levures, les moisissures, les virus, les mycobactéries en 10 minutes, les spores de bactéries en 1 heure.

Testé selon:

Bactéricide (EN 14561, EN 13727)

Fongicide (EN 13624, EN 14562)

Tuberculocide (EN 14348),

Sporicide (EN 13704), AOAC

Virucide (EN 14476 + A1).

Mycobactéricide (EN 14563, EN 14348)

MODE D'EMPLOI

PRODUIT PRET A L'EMLOI

1- Etape de pré-désinfection: Nettoyer le dispositif médical avec un produit type: LIQUISEPT OU WARECLEAN.

2- Etape de désinfection: verser la solution dans un bac.

temps de contact: 15 min

temps de conservation maximum du bain: 14 jours

3- Rincer soigneusement le dispositif médical.

4- Essuyer avec un champ à usage unique.

CONDITIONNEMENTS - RÉF

4 bidons de 5 L

06071-5000



Ne nécessite pas d'activation !



pH 6,0 +/- 0,4.



Actif contre les bactéries, les levures, les moisissures, les virus, les mycobactéries en 10 minutes



Actif contre les spores de bactéries en 1 heure.



medical proximity™

Tel/Fax : +213 (0) 35 33 80 60

Mobile : +213 (0) 560 00 22 70

Email : medproximity.dz@gmail.com

www.medicalproximity.com