



6009 - SURFACTO™ NEUTRAL

Désinfectant pour surface de machine d'hémodialyse

Désinfectant de surface pour appareils d'hémodialyse entre traitements. Convient pour la désinfection efficace et le nettoyage des surfaces de la machine de dialyse. Dispositif médical de classe IIa



COMPOSITION

Du chlorure d'alkyl diméthyle benzylammonium (0,1%), du bromure de dodécyl triméthylammonium, du propylène glycol, du benzotriazole, de l'éthanol à 96%, des antioxydants, des stabilisants. Exempt de glutaraldéhyde, de formaldéhyde, de tampons et d'autres dérivés phénoliques.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, fongicide et virucide.

MODE D'EMPLOI

Formule prête à l'emploi.

Pulvériser sur la surface du dispositif

Attendre 1 minute

Nettoyer avec un chiffon stérile

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil

CONDITIONNEMENTS - RÉF.

20 flacons de 1L avec pulvérisateurs

06009-1000

- Formule prête à l'emploi.
- Sans aldéhyde ni phénol.
- Ne laisse pas de trace ni de film gras.
- Pas de rinçage.
- Formule compatible avec l'acrylique, le verre et le PVC.
- Désinfectant extrêmement efficace avec propriétés nettoyantes.
- Biodégradable, inoffensif pour l'environnement, sans danger pour l'homme.
- Large spectre antimicrobien en 1 minute.



medical proximity™

Tel/Fax : +213 (0) 35 33 80 60

Mobile : +213 (0) 560 00 22 70

Email : medproximity.dz@gmail.com

www.medicalproximity.com

Catalogue des désinfectants